

AIRBASE Kompressorlaufzeiten

HOVERBOARD®

Für die Prüfung bitte folgendes beachten:

Die Fahrzeugbatterie muß voll leistungsfähig sein, sonst ist mit erheblichen Laufzeitverlängerungen zu rechnen.

Daher am Hausanschluß anschließen oder Motor laufen lassen !

Das Hoverboard mit Fahrtrage und Patient bis max. 100 kg belasten.

Laufzeit in Minuten: Sekunden

		Airbase (Kompressor 30207)	Gemessen
1	Von Hauptschalter AUS auf Federstellung (I):	02:30 bis 03:15	
2	Automatische Wiederbefüllung während der Fahrt: (wird simuliert durch schwingen, bis Kompressor anläuft)	00:25 bis 00:50	
Bei erheblicher Zeitüberschreitung ist entweder das System undicht oder der Kompressor zu schwach !			
Stand: 10/2019, technische Änderungen vorbehalten.			