

POWERBASE - Kompressorlaufzeiten



Für die Prüfung bitte folgendes beachten:

Die Fahrzeugbatterie muß voll leistungsfähig sein, sonst ist mit erheblichen Laufzeitverlängerungen zu rechnen.

Daher am Hausanschluß anschließen oder Motor laufen lassen !

Das Hoverboard mit Fahrtrage und Patient bis max. 100 kg belasten.

Laufzeit in Minuten: Sekunden

		Powerbase (Kompressor 30209)	Gemessen
1	Von Hauptschalter AUS auf Federstellung (I):	01:40 bis 02:45	
2	Von Hauptschalter AUS direkt auf Reanimationsstellung (II):	03:20 bis 4:10	
3	Automatische Wiederbefüllung während der Fahrt: (wird simuliert durch schwingen, bis Kompressor anläuft)	00:15 bis 00:30	
Bei erheblicher Zeitüberschreitung ist entweder das System undicht oder der Kompressor zu schwach !			
Stand: 10/2019, technische Änderungen vorbehalten.			