

POWERBASE - Kompressorlaufzeiten



Für die Prüfung bitte folgendes beachten:

Die Fahrzeugbatterie muß voll leistungsfähig sein, sonst ist mit erheblichen Laufzeitverlängerungen zu rechnen.

Daher am Hausanschluß anschließen oder Motor laufen lassen !

Das Hoverboard mit Fahrtrage und Patient bis max. 100 kg belasten.

Laufzeit in Minuten:Sekunden

	(Kompressor 30209)	Gemessen
1 Von Hauptschalter AUS auf Federstellung (I):	maximal 2:45	
2 Von Hauptschalter AUS direkt auf Reanimationsstellung (II):	maximal 4:15	
3 Automatische Wiederbefüllung während der Fahrt: (wird simuliert durch schwingen, bis Kompressor anläuft)	maximal 0:30	
Bei erheblicher Zeitüberschreitung ist entweder das System undicht oder der Kompressor zu schwach !		
Stand: 9/2020, technische Änderungen vorbehalten.		